

Allgemeines

Ohrstöpsel aus imprägnierter Schafwolle zum mehrmaligen Gebrauch.

Unterliegt nicht der PSA (persönliche Schutzausrüstung) - Verordnung nach EN 352-2:2002, EU 2016/425.

Material: imprägnierte Schafwolle

Farbe: hautfarben

Größe: entfällt

Eigenschaften: Vorportionierte Bäschen aus Schafwolle. Das Hörvermögen und die normale Belüftung der Ohren werden nicht beeinträchtigt. Das Produkt ist salzwasserbeständig und auch für Kinder geeignet.

Anwendung: IN-Ohr Stöpsel (wird in den Gehörgang eingeführt)



Anwendung:

Den Ohrstöpsel dicht in den Gehörgang einführen und gelegentlich auf festen Sitz hin kontrollieren.

Hinweise

- Achten Sie auf eine hygienische Anwendung. Ihre Hände, Ohren und Ohrstöpsel müssen sauber und trocken sein!
- OHROPAX® Windwolle kann, solange sie hygienisch einwandfrei ist, wiederverwendet werden. Dazu die Stöpsel nach Gebrauch zur Entfernung von Restfeuchtigkeit vorsichtig ausdrücken und anschließend an der Luft gut trocknen. Eine Reinigung mit Seife ist nicht möglich, da dies unter Umständen die wasserabweisende Imprägnierung entfernen könnte.
- Ersetzen Sie verschmutzte, beschädigte oder unzureichend abdichtende Ohrstöpsel.
- Bei Paukenröhrchen, chronischen Ohrenleiden und Verletzungen des Trommelfells fragen Sie vor Anwendung bitte Ihren Arzt.
- **Achtung: Das Produkt bietet keinen ausreichenden Schutz beim Schwimmen und Tauchen.**
- Von Kleinkindern fernhalten (Gefahr des Verschluckens).
- Anwendung bei Kindern ab sechs Jahren möglich; nur unter Anleitung von Erwachsenen.
- Aufbewahrung: In der Dose, trocken.

Einsatzgebiete

Im privaten Bereich: OHROPAX® Windwolle ist aufgrund seines hohen Tragekomforts ideal geeignet bei Wind und Kälte, hält sie bei Nässe trocken und schützt vor Wasserspritzern beim Duschen, Haarewaschen und Baden.

Verträglichkeit

OHROPAX® Windwolle gilt als ausgesprochen gut verträglich. Bestandteile mit bekanntem allergieauslösendem Potenzial sind nicht enthalten.